

## MANUAL DE AFERIÇÃO DE TEMPERATURA COM UTILIZAÇÃO DO TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO

A pessoa que realizar a aferição de temperatura deverá utilizar, durante todo o procedimento, as luvas e máscaras descartáveis, com objetivo de resguardar sua saúde e a dos demais trabalhadores.

1. Certificar-se de que o botão Modo de Medição esteja para cima, no Modo Pessoa.



2. Pressione o botão Liga/ Desliga (0/I). Após um sinal sonoro curto, o termômetro estará pronto para o uso.
3. Aponte o sensor de medição no centro da testa, a uma distância de 5 a 10 cm. Mantenha o botão Start pressionado até ouvir o sinal sonoro. A temperatura será mostrada no visor do aparelho, com a emissão de um bip longo.



4. A partir de 37,5° dez bips curtos são emitidos e o monitor mostrará o resultado com uma luz vermelha, indicando estar próximo ao estado febril. Cabe lembrar que somente será considerada como febre a temperatura maior ou igual a **37,8°**, conforme orientação da ANVISA em sua Nota Técnica N° 47/2020/SEI/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA.
5. Necessário desligar o aparelho entre uma medição e outra.